

تاریخ: --/--/--

شرکت امین طب

خدمات امین تکنولوژی نوین

نام و امضای تنظیم کننده:

Siemens Immulite Maintenance Checklist

نگهداری روزانه																											ردیف					
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
																															کنترل و پر کردن Reaction tube	1
																															کنترل و پر کردن ظرف آب مقطر	2
																															کنترل و پر کردن Probe wash	3
																															کنترل و پر کردن ظرف سوبسترا	4
																															کنترل و تخلیه ضایعات جامد و ظرف فاضلاب	5
																															انجام prime برای water probe	6
																															انجام prime برای substrate Probe	7
																															انجام Prime پیپتورهای sample و Reagent	8
																															خارج شدن از نرم افزار و ریست کردن کامپیوتر (در صورت روشن بودن همیشگی)	9
																															تمیز کردن پروب Reagent و Sample	10

نگهداری هفتگی												ردیف			
هفته چهارم			هفته سوم			هفته دوم			هفته اول						
														نظافت لوله های Waste	1
														انجام water test	2

نگهداری ماهانه		ردیف	
پایان هر ماه			
		بررسی زاویه خروج مایع از Reagent Probe	1
		نظافت فیلتر فن	2
		پاکسازی ترانسدیوسر تشخیص لخته	3
		پاکسازی ظروف و مسیر مایعات (Decontamination)	4